



LABORATOIRE NATIONAL DES SERVICES DE RÉFÉRENCE DU VIH
DIRECTIVES DE SOUMISSION D'ÉCHANTILLONS AU LNSRV

Liste de soumission

- Une requête de LNSRV est complétée
- Fourni un courriel et/ou un numéro de télécopieur sécurisé pour les rapports finaux
- Rencontre les exigences de spécimens pour le test sélectionné
- Échantillon est emballé conformément au règlement TMD*
- Expéditeur et courrier sont TMD certifié*

NOTE : les changements sont surlignés en gris

1. **REQUÊTE D'ANALYSE** - Une requête VIH/HTLV/GSS du LNSRV doit être utilisée pour toutes les demandes d'échantillons. Disponible sur : <https://cnphi.canada.ca/gts/laboratory/10080>

2. **EXIGENCES DE SOUMISSION D'ÉCHANTILLONS**

Les échantillons qui ne constituent pas le bon type d'échantillon, dont le volume est insuffisant, ou qui ne sont pas accompagnés des renseignements pertinents sur le patient peuvent être rejetés.

Test	Type d'échantillon	Volume	Entreposage/Expédition
2.1. PCR VIH-1/2 2.2. PCR/Sérologie HTLV-I/II 2.3. HTLV-I Quantitatif	anticoagulant EDTA seulement	5mL (2mL minimum à l'exception des bébés)	Température ambiante (reçu dans les 48 heures suivant le prélèvement)
2.4. Charge Virale VIH-1	Plasma	2mL minimum	-70°C
2.5. Charge Virale VIH-2	Plasma	2mL minimum	-70°C
2.6. Sérologie VIH-1/2 2.7. <i>Seulement</i> INNO-LIA HTLV-I/II	Plasma/Sérum	0.6mL minimum	Expédié selon votre température d'entreposage
2.8. VIH 2.9. VHC 2.10. Syphilis (dépistage) 2.11. AgHBs	Gouttes de sang séché	Carte complète (5 cercles entièrement remplis = optimal; moins de 5 cercles = analyse limitée)	Expédier à température ambiante. Voir la rubrique « Directives pour le prélèvement, l'emballage et l'entreposage des échantillons de gouttes de sang séché ».

Le Laboratoire national des services de référence pour le VIH est accrédité selon les normes ISO 15189 par le Conseil canadien des normes pour les domaines d'accréditation spécifiques publiés sur www.scc.ca

AUTRES ÉCHANTILLONS - LCR, TISSU, ETC.

- Veuillez contacter le LNSRV afin de vous assurer de la conformité des échantillons.

3. **EXPÉDITION** (<https://tc.canada.ca/fr/services-generaux/lois-reglements/liste-reglements/reglement-transport-marchandises-dangereuses>)

- Adresse : **Réception des spécimens**
Attn: Dr. John Kim
National Microbiology Laboratory
1015 rue Arlington, local J1139
Winnipeg, MB, R3E 3R2
- Expédié par un courrier qui est certifié par le transport des marchandises dangereuses (TMD) directement au LNSRV
- * Les échantillons de gouttes de sang séché ne sont pas assujettis au Règlement sur le transport des marchandises dangereuses; ils peuvent donc être expédiés par courrier régulier ou par service de messagerie.
- Avertissez le LNSRV des expéditions avec le numéro de suivi par télécopieur, téléphone ou par courriel (ci-dessous)

Titre: Directives de soumission d'échantillons au LNSRV
Date d'émission: 2025-02-25

Formulaire # :NHRL-HRS-LABF027F-11

4. RAPPORTS FINAUX

- Les rapports finaux seront seulement distribués par courriel et/ou télécopieur. Assurez-vous que le courriel et le télécopieur est courant et sécurisé.

Contact:

courriel du laboratoire :
télécopieur du laboratoire :
Philip Lacap :
Sandra Kiazzyk, Ph. D. :

nlhrs-lnsrv@phac-aspc.gc.ca
(204) 318-2221
(204) 789-6522
(204) 789-6479